

Informe sobre Coronavírus (2019-nCoV)

Recomendações que devem ser seguidas para a utilização de máscaras N95/PFF2.

Fique atento

As máscaras N95/PFF podem ser reutilizadas, desde que sejam seguidas as seguintes recomendações:

Fique atento

- Inspecionar, antes de cada uso, devendo ser descartada se estiver amassada, danificada ou visivelmente suja;
- Realizar higienização das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70% antes e depois de tocar ou ajustar a máscara (se necessário para conforto ou para manter ajuste);
- Armazenar a máscara utilizada em embalagem individual não hermética, de forma a permitir a saída da umidade (por exemplo, embalagem plástica perfurada), em um recipiente limpo e lavável.

Fique atento

- Para minimizar a contaminação cruzada, guardar as máscaras de forma que não tenham contato umas com as outras. As máscaras devem estar identificadas com o nome do profissional e os recipientes de armazenamento devem ser descartados ou limpos regularmente;
- Evitar tocar no interior da máscara;
- Utilizar um par de luvas de procedimento ao colocar uma máscara N95 já usada anteriormente e ao realizar a verificação de selagem. Após esse procedimento, descartar as luvas;
- A utilização prolongada da máscara N95/PFF2, sem a remoção das mesmas entre cada atendimento, é indicada para a assistência a pacientes que estejam em coorte, ou seja, com o mesmo diagnóstico de doença infecciosa (Covid-19);
- Descartar a sempre que houver contaminação com sangue ou outros fluidos corporais dos pacientes. Período sugerido de uso se em condições ideais de 30 dias.